



### **Gebruik van de Pico-Smokerlyzer**

1. Druk de blauwe knop gedurende 3 seconden in (tot er tekst op het scherm verschijnt)
2. plaats de klem in de opening van het toestel
3. plaats een mondstuk in karton op de klem
4. druk tweemaal kort na elkaar op de blauwe knop
5. laat de persoon gedurende 15 seconden inademen
6. wanneer het fluitsignaal afgaat, mag de persoon langzaam en zo lang mogelijk uitademen.
7. De lampjes geven een kleurindicatie, zo krijg je onmiddellijk een beeld
8. op het scherm komt de indicatie in PPM (voor de interpretatie, zie tabel)
9. schakel het toestel uit door gedurende 3 seconden op de blauwe knop te drukken